

Hogyan használjam a **Brava®** Elasztikus Szalagot



Előkészítés

1



Vegye ki a csomagolásból



Húzza le a védőfóliát a szalag hosszabbik szakaszáról

Illesztés

2




Helyezze fel a szalagot úgy, hogy az részben lefedje az alaplapp szélét, részben tapadjon a környező bőrfelülethez



Húzza le a maradék védőfóliát a szalagról

Befejezés

3

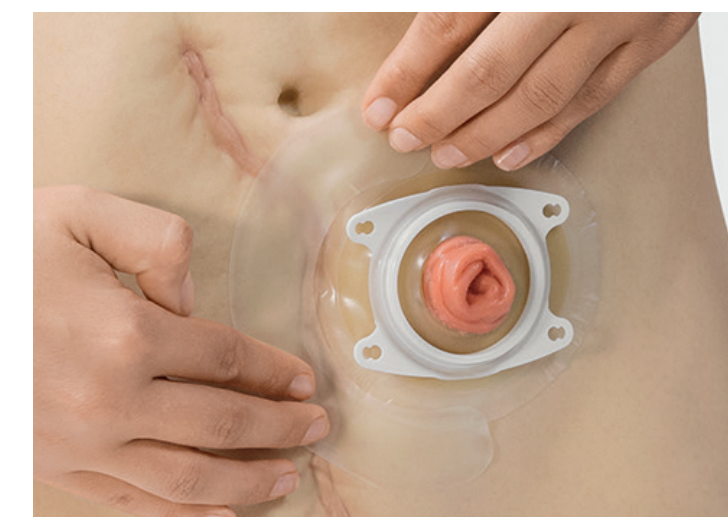

Simítsa a helyére



Próbálja ki további szalagot, ha nagyobb biztonságra van szüksége

Brava® Elasztikus Szalag az alaplapp megfelelő felhelyezése után kerül alkalmazásra.

 Használat előtt mindig tájékozódjon a felhasználási útmutatóból, mely a termékhez van csomagolva.

A Coloplast logo Coloplast A/S bejegyzett védjegye.
Minden jogot fenntartunk.
Lezárás dátuma **2022.03.24** Azonosító: **PM-21313**
OC/HCP-22/04

Ostomy Care / Continence Care / Wound Care / Interventional Urology

