

Hogyan használjam a *Brava*[®] *Sikosító Szagtalanító Dezodort*



Előkészítés

1




Rázza jól fel használat előtt

Zárt
zsák

2



Juttasson 5-10ml-t a zsákba

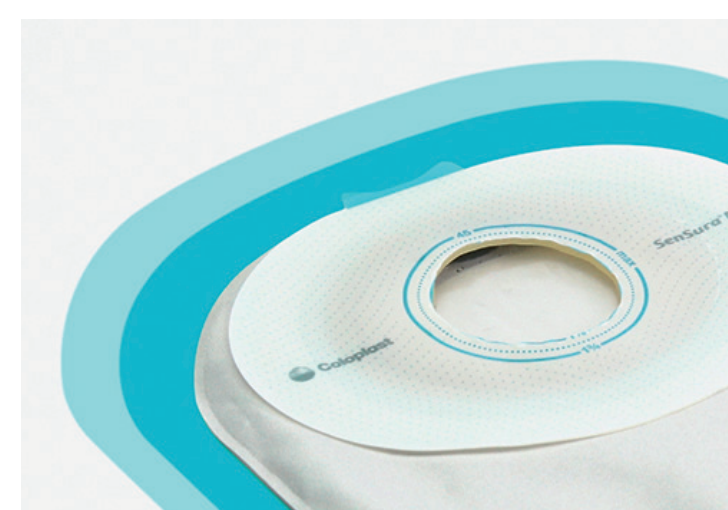

Nagyobb zsákhoz használjon több dezodort



Gyengéden dörzsölje össze a zsákot a jobb elkenés érdekében

Nyitott
zsák


3



Juttassa be a zsák nyílásán keresztül



Gyengéden dörzsölje össze a zsákot a jobb elkenés érdekében

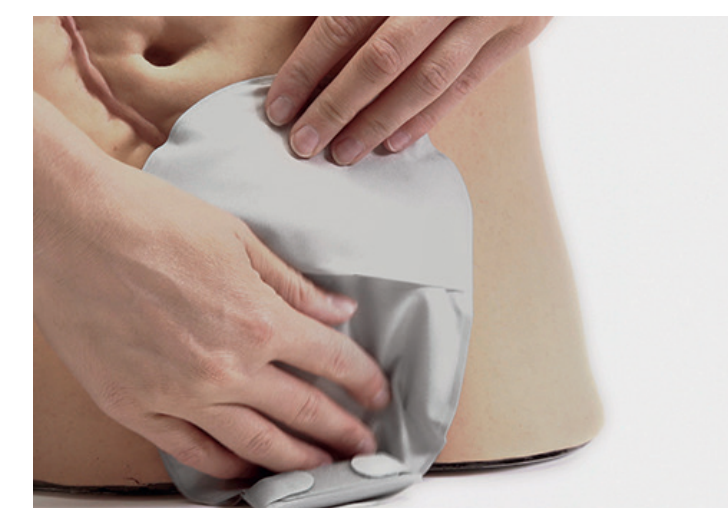

Ismételje meg a zsák kiürítése után

 Használat előtt mindig tájékozódjon a felhasználási útmutatóból, mely a termékhez van csomagolva.

A Coloplast logo Coloplast A/S bejegyzett védjegye.
Minden jogot fenntartunk.
Lezárás dátuma **2022.03.28.** Azonosító: **PM-21381**
OC/HCP-22/06

Ostomy Care / Contenance Care / Wound Care / Interventional Urology

 **Coloplast**