


# Hogyan használjam a *Brava*<sup>®</sup> Formálható Gyűrűt



## Előkészítés


1

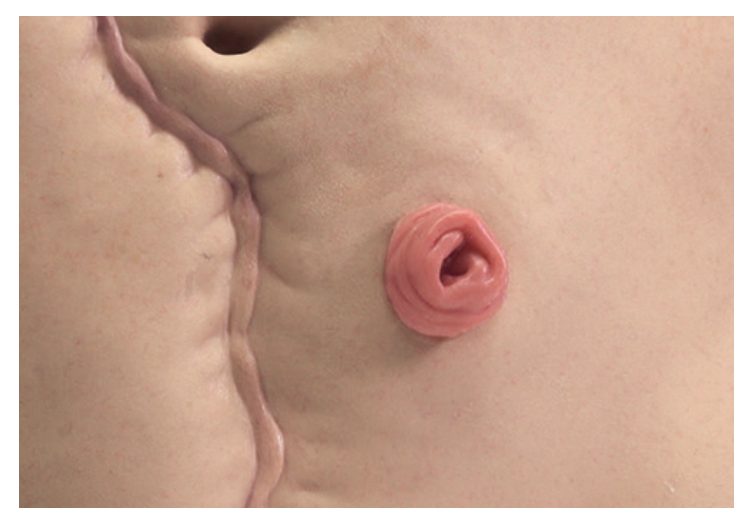

Bizonyosodjon meg arról, hogy a bőre tiszta és száraz



Válassza le a gyűrűt a csomagolásról

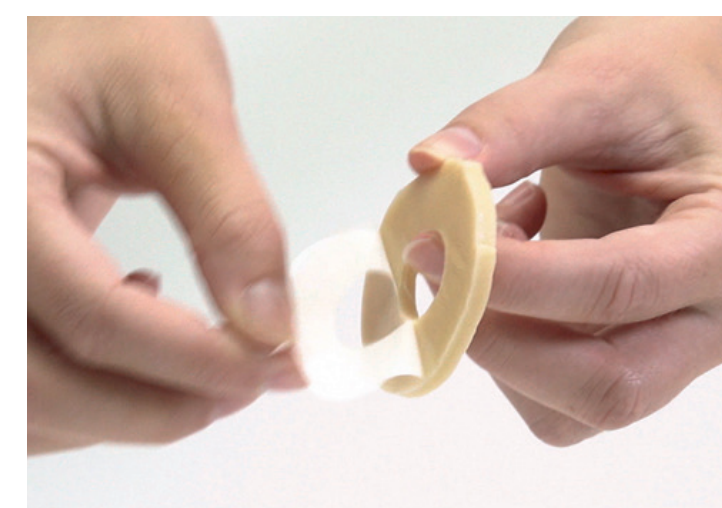

Válassza le mindkét oldalról az eltávolítható borítást

## Formálás

2



Alakítsa és



húzza szét a gyűrűt a kívánt formára

## Felhelyezés

3



Gyengéden nyomogassa a sztóma köré, amíg ki nem alakul a szoros bőrkontaktus



Igazítsa meg a formát még egyszer ha szükséges



Helyezze fel az alaplapot

 Használat előtt mindig tájékozódjon a felhasználási útmutatóból, mely a termékhez van csomagolva.

A Coloplast logo Coloplast A/S bejegyzett védjegye.  
Minden jogot fenntartunk.  
Lezárás dátuma 2022.03.24. Azonosító: PM-21316  
OC/HCP-22/08

Ostomy Care / Continence Care / Wound Care / Interventional Urology

