


Hogyan használjam a *Brava*[®] *Bőrvédő Kendőt*




1

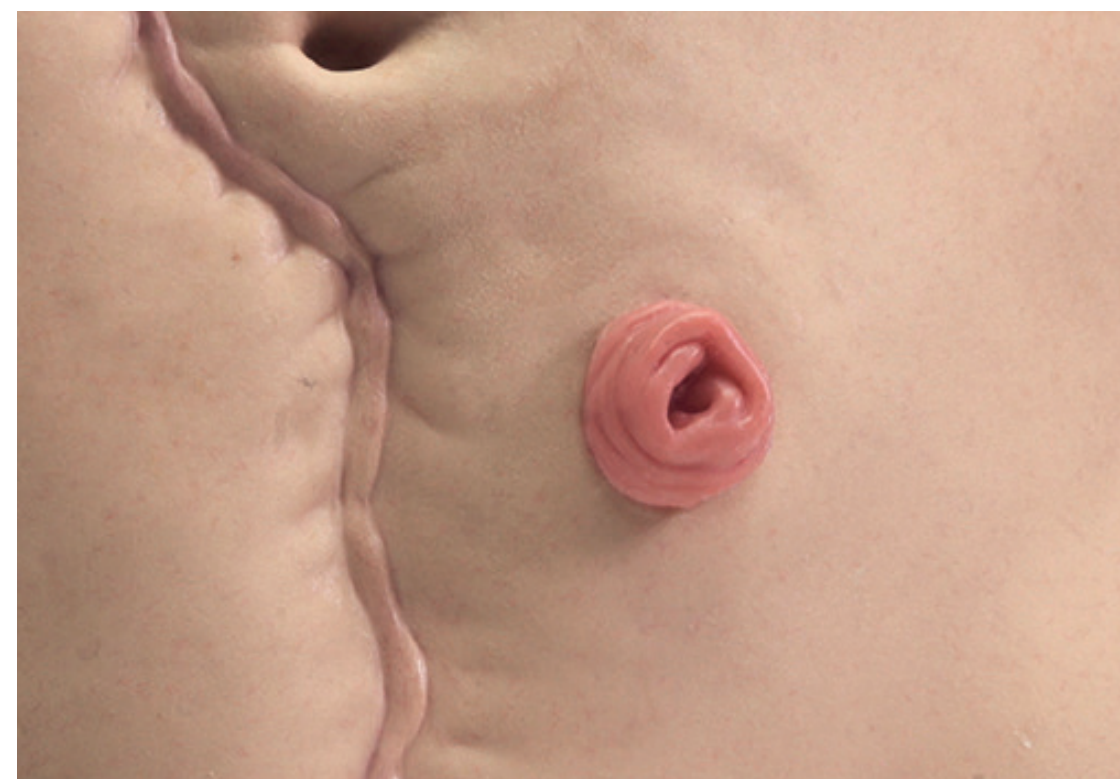

Bizonyosodjon meg arról,
hogy a bőre tiszta és száraz



Nyissa ki a tasakot, vegye ki
és nyissa szét a kendőt.
Alkalmazza a sztóma körüli
területen.

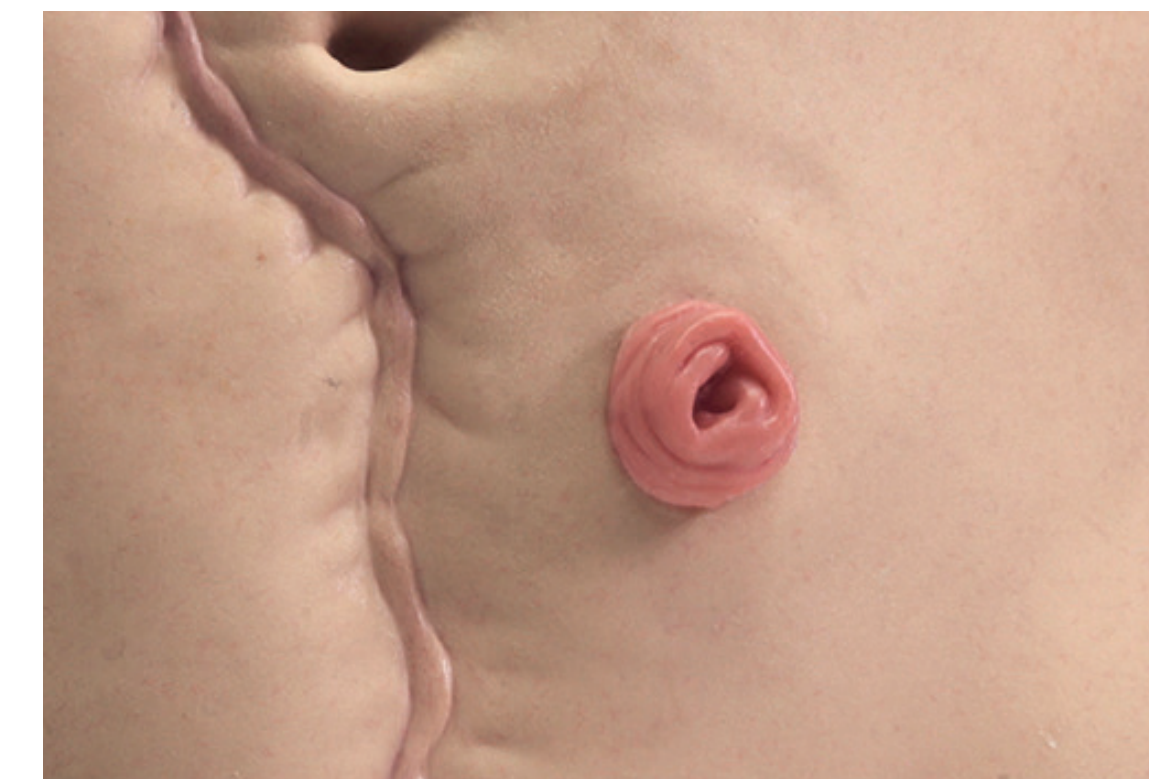

Várjon, míg a bőre megszárad

 Használat előtt mindig tájékozódjon a felhasználási útmutatóból, mely a termékhez van csomagolva.

A Coloplast logo Coloplast A/S bejegyzett védjegye.
Minden jogot fenntartunk.
Lezárás dátuma **2022.03.24.** Azonosító: **PM-21319**
OC/HCP-22/12

Ostomy Care / Contenance Care / Wound Care / Interventional Urology

