


Hogyan használjam a **Brava[®]** Hintőport

A Brava Hintőpor **nedvedző bőrre** ajánlott.

Előkészítés

1

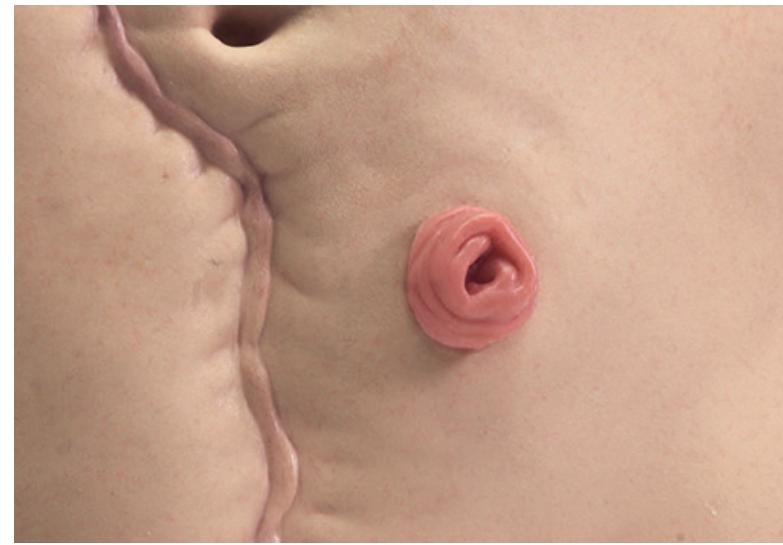

Bizonyosodjon meg arról, hogy a bőre tiszta és száraz



Használat előtt rázza fel a flakont

Alkalmazás

2




Oszlassa szét, ahol szükséges



Egyengesse el a hintőpor réteget

Befejezés

3

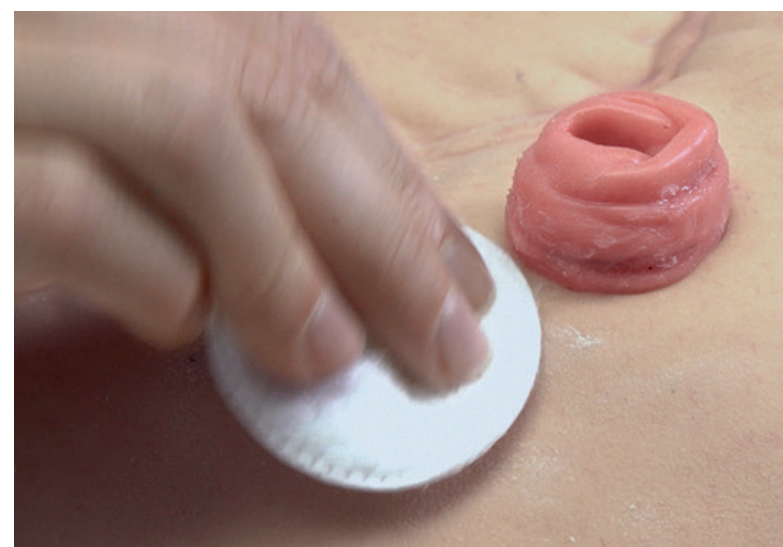

Törölje le a felesleges hintőport



 Használat előtt mindig tájékozódjon a felhasználási útmutatóból, mely a termékhez van csomagolva.

A Coloplast logo Coloplast A/S bejegyzett védjegye.

Minden jogot fenntartunk.

Lezárás dátuma **2022.03.30.** Azonosító: **PM-21398**

OC/HCP-22/10

[Ostomy Care](#) / [Continence Care](#) / [Wound Care](#) / [Interventional Urology](#)

 **Coloplast**